

Gebrauchsanweisung

chung shi DUX Gesundheitsschuhe

Inhalt

Urheberrechtsvermerk.....	2
1. Einleitung	3
1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung und Indikation.....	3
1.2. Kontraindikationen.....	3
2. Sicherheit.....	4
2.1. Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
2.2. Produktlabel.....	5
3. Beschreibung.....	5
3.1. Lieferumfang.....	5
3.2. Produktvarianten	5
3.3. Materialinformationen	5
3.4. Lebensdauer.....	5
4. Bedienung/Anwendung.....	6
5. Reinigung und Desinfektion.....	7
5.1. Reinigung mit Spülmittel.....	7
5.2. Chemische Reinigung und Desinfektion	7
5.3. Trocknen und Aufbewahren	8
6. Ersatzteile und Zubehör.....	8
7. Sonstiges	9
7.1. Entsorgung	9
7.2. Garantie.....	9
7.3. Kontakt	9

Urheberrechtsvermerk

Copyright © ME & Friends AG.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Dokumentes darf ohne schriftliche Genehmigung der ME & Friends AG nicht vervielfältigt oder reproduziert werden.

Alle in diesem Dokument verwendeten Firmennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Marken- und Warenzeichen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwendet werden.

Änderungen in der Ausführung und im Lieferumfang sind im Rahmen der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

ME & Friends AG
Rudolf-Diesel-Ring 11
D-83607 Holzkirchen
Tel.: +49(0) 8024 60898-0
Fax: +49(0) 8024 608 98-20
Email: info@chung-shi.de

1. Einleitung

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung und Indikation

Die chung shi DUX, chung shi DUX Sensi und chung shi DUX Kids sind funktionale Gesundheitsschuhe. Die chung shi DUX Gesundheitsschuhe können zur Prävention von:

- Kompressionsschäden (z.B. Hallux valgus, Morton-Neuralgie)
- Oberflächliche Druckschäden (z.B. Calvus, ausgeprägte Schorf-/ Hornhautbildung)
- Überlastungsphänomene (z.B. Haglund Exostose)
- Fehlstellungen (z.B. Knickfuß, Senkfuß, Spreizfuß, Sichelfuß, Fersensporn)
- Reduktion von Druckspitzen

eingesetzt werden.

Die chung shi DUX Gesundheitsschuhe können zur Therapie von:

- Akutem chronischen Fersensporn, Fasciitis plantaris
- Fersenbeinprellung
- Akuten/ chronischen Metatarsalgien bei Spreizfuß
- Kniegelenk- und Hüftgelenkarthrose
- Degenerative Wirbelsäulenveränderungen
- Diabetikerfüße

eingesetzt werden.

Die chung shi DUX Gesundheitsschuhe haben die Aufgabe den Fuß zu stützen, zu entlasten, weich zu betten und den Fuß in seiner Haltung zu korrigieren.

Die chung shi DUX und der chung shi DUX sensi sind für Erwachsene bei einer Schuhgröße von 34 bis 49 geeignet.

Die chung shi DUX KIDS sind für Kinder bei einer Schuhgröße von 20-35 geeignet.

1.2. Kontraindikationen

Die chung shi DUX Gesundheitsschuhe dürfen nicht direkt auf verletzter oder geschädigter Haut getragen werden. Decken Sie verletzte oder geschädigte Haut immer mit einem Verband ab.

VORSICHT: Direkter Kontakt mit dem chung shi DUX Gesundheitsschuh zu geschädigter oder verletzter Haut kann zu weiteren Verletzungen führen.






2. Sicherheit







2.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemein:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung können Verletzungen oder Schäden am Produkt nicht ausgeschlossen werden.

Gestaltung von Sicherheitshinweisen:

HINWEIS:		Hinweise sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder kurzfristigen Unannehmlichkeiten führen können.
VORSICHT		Bei Missachtung von Sicherheitshinweisen die mit VORSICHT gekennzeichnet sind, kann dies zu Verletzungen führen, die ggf. eine Intervention durch med. Fachpersonal erfordert.
WARNUNG		Bei Missachtung von Sicherheitshinweisen die mit WARNUNG gekennzeichnet sind, kann dies zu schweren Verletzungen führen, die eine Intervention durch med. Fachpersonal erfordert.

Symbol	Bedeutung
	Hersteller
	Herstelldatum: jjj-mm
	Artikelnummer
	Temperaturbegrenzung
	Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

2.2. Produktlabel

chung shi DUX	Siehe Schuhkarton
chung shi DUX SENSI	Siehe Schuhkarton
chung shi DUX KIDS	Siehe Schuhkarton

3. Beschreibung

3.1. Lieferumfang

Diese Packung enthält ein Paar chung shi DUX Gesundheitsschuhe inkl. Ersatzknöpfe.

3.2. Produktvarianten

chung shi DUX	Erhältlich Größen: 34-49/ in diversen Farben
chung shi DUX SENSI	Erhältlich Größen: 34-49/ in diversen Farben
chung shi DUX KIDS	Erhältlich Größen: 20-35/ in diversen Farben

Alle verfügbaren Größen und Farben sind auf der Internetseite <http://www.chung-shi.com/> einzusehen.

3.3. Materialinformationen

chung shi DUX	100% Ethylenvinylacetat (EVA)
chung shi DUX SENSI	100% Ethylenvinylacetat (EVA)
chung shi DUX KIDS	100% Ethylenvinylacetat (EVA)
Knopf	Kunststoff (Nylon und Urethane)

3.4. Lebensdauer

Die Sohle verfügt über ein Profil, das zugleich als Verschleißindikator dient. Ist keine großflächige Profilierung mehr sichtbar (= 60% oder mehr der Sohlenfläche) empfehlen wir, das Produkt auszutauschen.

WARNUNG: Tauschen Sie den Gesundheitsschuh spätestens nach 5 Jahren aus, da sich das Material des Schuhs verändern kann. Die Wirksamkeit der Therapie kann dadurch beeinträchtigt werden.



4. Bedienung/Anwendung

Prüfen Sie das Produkt vor Gebrauch auf Unversehrtheit.

WARNUNG: Beschädigungen können zu Verletzungen führen und die Wirksamkeit der Therapie beeinträchtigen.



Die Gesundheitsschuhe dürfen aus hygienischen Gründen nur von einem Patienten verwendet werden.

VORSICHT: Eine Benutzung der Gesundheitsschuhe von mehreren Patienten kann zu Infektionen wie z. B. Fußpilz führen.



Sie können zwischen 3 Varianten des chung shi DUX Gesundheitsschuhs auswählen:

- chung shi DUX
- chung shi DUX SENSI
- chung shi DUX KIDS

Wählen Sie zunächst die für Sie passende Schuhgröße aus. Lassen Sie sich am besten durch eine Anprobe bei Ihrem Fachhändler beraten.

VORSICHT: Eine falsche Schuhgröße kann zu Unstabilität oder Umknicken und damit zu Verletzungen führen.



Die chung shi DUX Gesundheitsschuhe können unbedenklich von Kindern und Erwachsenen getragen werden. Zur Stabilität können Sie den Fersenriemen benutzen.

HINWEIS: Eine Sollbruchstelle an den Fersenriemengelenken sorgt zusätzlich dafür, dass im Falle eines Hängenbleibens mit dem Riemen möglichst keine Verletzungen entstehen.



HINWEIS: Bei unnatürlichem Gangbild kann sich das Material der chung shi DUX Gesundheitsschuhe elektrostatisch aufladen. Falls dieses Phänomen störend auftreten sollte, kann dieses Phänomen durch Kontaktstreifen, die am Produkt befestigt werden, eliminiert werden. Die Kontaktstreifen können kostenlos beim Vertrieb der ME & Friends AG angefordert werden.



VORSICHT: Auf glatten und/ oder nassen Böden besteht Rutschgefahr, wenn das Sohlenprofil nicht mehr sichtbar ist. Tauschen Sie dann den chung shi DUX Gesundheitsschuh aus.



VORSICHT: Verändern Sie nicht den chung shi DUX Gesundheitsschuhe, z.B. durch Einschneiden. Beschädigungen können zu Verletzungen führen und die Wirksamkeit der Therapie beeinträchtigen.
Eine Individualisierung durch Einlegesohlen ist nur durch geschultes Fachpersonal erlaubt.



VORSICHT: Der chung shi DUX Gesundheitsschuh enthält Kleinteile. Kleinteile können die Atemwege blockieren und zu Erstickungsgefahr führen. Achten Sie darauf, dass Kleinteile wie z.B. Ersatzteile stets außer Reichweite von Babys und Kleinkindern aufbewahrt werden.



5. Reinigung und Desinfektion

5.1. Reinigung mit Spülmittel

Der chung shi DUX Gesundheitsschuh sollte regelmäßig gründlich unter fließendem Leitungswasser 2 Minuten gereinigt werden. Entfernen Sie zuerst grobe Verschmutzungen mit einer Bürste. Es sollten keine groben Verschmutzungen mehr sichtbar sein.

Reinigen Sie den chung shi DUX Gesundheitsschuh 5 Minuten lang gründlich mit handwarmem Leitungswasser und Spülmittel. Spülen Sie den chung shi Gesundheitsschuh gründlich unter fließend warmem Leitungswasser ab. Die Temperatur des Leitungswassers muss kleiner 30°C sein.

5.2. Chemische Reinigung und Desinfektion

Optional können Sie den chung shi DUX Gesundheitsschuh chemisch reinigen und desinfizieren. Wir empfehlen eine wöchentliche Reinigung/ Desinfektion.

HINWEIS: Beachten Sie bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels die Verträglichkeit mit dem verwendeten Material, da sonst Schäden am Produkt nicht ausgeschlossen werden können.



Für die manuelle Reinigung und Desinfektion benötigen Sie:

- aldehydfreies Instrumenten-Desinfektionsmittel (z.B. Bomix® Plus der Firma Bode Chemie)
- Leitungswasser und
- Bürste

Entfernen Sie zuerst grobe Verschmutzungen mit einer Bürste unter fließendem Leitungswasser. Legen Sie den Gesundheitsschuh in die Reinigungs-/ Desinfektionslösung ein. Beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers für die Reinigungs-/ Desinfektionslösung zu Konzentration und Einwirkzeit. Spülen Sie die

Gesundheitsschuhe mindestens 2 Minuten gründlich mit Leitungswasser ab, bis die Reinigungs- und Desinfektionslösung vollständig entfernt ist. Die Temperatur des Leitungswassers muss kleiner 30°C sein.

HINWEIS: Der Gesundheitsschuh muss vollständig mit der Reinigungs- und Desinfektionslösung bedeckt sein, da sonst die Wirksamkeit nicht erfüllt werden kann. Es dürfen keine Hohlräume oder Luftblasen bestehen.



HINWEIS: Beachten Sie die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise des Herstellers der Reinigungs- und Desinfektionsmittellösung um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.



Das Verfahren ist validiert unter Verwendung von:

- Bomix® Plus der Firma Bode Chemie (2 % Lösung); aldehydfreies Instrumenten-Desinfektionsmittel
- 20°C Leitungswasser
- Bürste
- Reinigungsdauer 5 Min.

5.3. Trocknen und Aufbewahren

Beschleunigen Sie das Abtropfen des Wassers durch Ausschütteln. Lassen Sie den chung shi Gesundheitsschuh vollständig trocknen bevor Sie den chung shi Gesundheitsschuh wieder tragen.

Überprüfen Sie den chung shi Gesundheitsschuh nach jeder Reinigung bzw. Desinfektion. Ersetzen Sie gebrochene, verformte oder stark verfärbte Schuhe.

HINWEIS: Bewahren Sie die chung shi Gesundheitsschuhe geschützt vor anhaltender direkter Sonneneinstrahlung auf. Direkte Hitze führt zu Materialschäden.



6. Ersatzteile und Zubehör

Knopf	Artikelnummer: 8900999 Gratis erhältlich unter www.chung-shi-shop.com
Kontaktstreifen	Kommerziell erhältlich

7. Sonstiges

7.1. Entsorgung

Der Gesundheitsschuh kann am Ende seiner Lebensdauer in den Hausmüll entsorgt werden.

7.2. Garantie

2 Jahre Garantie auf alle Produkte der Marke Chung Shi. Registrieren Sie jetzt Ihr Produkt unter www.chung-shi.com/de/garantie/ und sichern Sie sich exklusive Vorteilsangebote!

7.3. Kontakt

ME & Friends AG
Rudolf-Diesel-Ring 11
D-83607 Holzkirchen
Tel.: +49(0) 8024 60898-0
Fax: +49(0) 8024 608 98-20
Email: info@chung-shi.de